

## 【MLAJ 製品レポート】

商品名：岡本メディカル 弾性トゥキャップ

サイズ：フリー

カラー：ベージュ・ブラック

圧迫圧：15～20mmHg

価格：2,860円(税込) 1枚入り

病期が1期と診断された下肢リンパ浮腫の患者様にお試しいただきました。

この患者様は足趾付け根から足背にかけて薬剤性浮腫の皮膚硬化がみられ、皮膚の硬さ改善を目的としてクッションの導入を検討していたため、本商品着用時にクッションを入れることを提案し、治療中にクッションと一緒に試着していただきました。

圧迫が苦手、とおっしゃる患者様でしたが、程良い圧迫でこれなら着用できそうとのお言葉をいただきました。一般医療機器ではない旨を説明したところ、納得された様子でした。

また、トゥキャップの下にクッションを入れるのも、伸縮性のある生地で自分でもできそうとのこと、クッションとともにセルフケアに導入していただくことになりました。



① 弾性着衣装着時に使うゴム手袋で、フィットするよう装着させる。



② 足背部分の生地を足趾付け根付近まで折り返し、クッションを挿入する。



③ 折り返していた足背部分の生地を戻す。